

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH MẪU NGOẠI KIỂM

NHUỘM SOI AFB

ĐỢT 04 NĂM 2025

(Hướng dẫn phân tích được cập nhật qua mỗi đợt ngoại kiểm)

Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị khoa/phòng xét nghiệm (PXN) đọc kĩ và thực hiện đúng theo hướng dẫn sau:

1. Nhận mẫu:

Kiểm tra thông tin, tình trạng mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được mẫu. Nội dung kiểm tra gồm:

- Thùng vận chuyển mẫu đảm bảo nguyên vẹn, không bị nứt vỡ
- Điều kiện vận chuyển bộ mẫu $< 25^{\circ}\text{C}$
- Bộ mẫu ngoại kiểm bao gồm 02 tiêu bản mã **MI-MBS-25-07** và **MI-MBS-25-08**
- Tính toàn vẹn mẫu: Tiêu bản không bị nứt hoặc vỡ.
- Nếu có bất kỳ vấn đề nào về tính toàn vẹn của mẫu, PXN vui lòng chụp ảnh xác nhận, liên hệ trực tiếp qua điện thoại và gửi email (kèm theo hình ảnh của mẫu ngoại kiểm đã chụp) về chương trình đề Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội (TTKC) làm căn cứ gửi lại mẫu. Thông tin liên hệ xem tại mục 6 của Hướng dẫn này. Các mẫu được TTKC xác nhận hủy bỏ, PXN cần xử lý như mẫu bệnh phẩm lây nhiễm theo đúng quy định về an toàn sinh học.

2. Bảo quản sau khi nhận mẫu:

PXN nên xử lý mẫu ngay khi nhận được. Nếu chưa thể thực hiện phân tích mẫu ngay, hãy bảo quản mẫu ở nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng trực tiếp.

3. Chuẩn bị mẫu và phân tích:

2 tiêu bản chứa phết bệnh phẩm đờm lấy từ bệnh nhân suy giảm miễn dịch, có tình trạng ho nhiều và sụt cân, đến khám tại phòng khám hô hấp. PXN hãy thực hiện nhuộm tiêu bản để đánh giá sự hiện diện của vi khuẩn AFB theo quy trình thường quy tương tự như mẫu bệnh nhân.

4. Báo cáo kết quả phân tích:

- PXN gửi kết quả về TTKC trước 17h ngày 10/12/2025.
- PXN nhập kết quả theo đường link (Đã được gửi qua địa chỉ email PXN đăng ký) hoặc quét mã QR sau:



5. An toàn sinh học:

Khi thao tác với mẫu ngoại kiểm, PXN cần tuân thủ các quy tắc, hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học tương tự như mẫu bệnh phẩm lây nhiễm.

6. Thông tin liên hệ:

- Phòng Xét nghiệm và Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm Vi sinh - Ký sinh trùng,
- Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Trường Đại học Y Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 02435.747.248/nhánh 15.
- Hotline: **0961.153.709**
- Email: ngoaikiemvisinh@qcc.edu.vn
- Website: <https://qcc.edu.vn/>