

HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH MẪU NGOẠI KIỂM

GENOTYPE HPV ĐỢT 3 NĂM 2026

(Hướng dẫn phân tích được cập nhật qua mỗi đợt ngoại kiểm)

Để kết quả ngoại kiểm được chính xác, đề nghị khoa/phòng xét nghiệm (PXN) đọc kĩ và thực hiện đúng theo hướng dẫn sau:

1. Nhận mẫu:

Kiểm tra thông tin và tình trạng mẫu ngoại kiểm ngay khi nhận được bộ mẫu. Nội dung kiểm tra gồm:

- Thùng vận chuyển mẫu đảm bảo nguyên vẹn, không bị nứt vỡ.
- Điều kiện vận chuyển bộ mẫu < 25°C.
- Thông tin trên ống mẫu ngoại kiểm phải rõ ràng.
- Bộ mẫu ngoại kiểm bao gồm: 03 mẫu tế bào cổ tử cung **MI-MHPV-26-07**, **MI-MHPV-26-08**, và **MI-MHPV-26-09**.
- Tính toàn vẹn mẫu: ống mẫu không bị bật nắp ống, nứt hoặc vỡ.
- PXN đưa ra các nhận định trực quan về bộ mẫu ngay khi nhận đượ, nếu có dấu hiệu bất thường nào ngoài tính toàn vẹn của bộ mẫu, PXN thực hiện đánh giá tại biên bản giao nhận mẫu và vui lòng gọi điện trực tiếp tới số điện thoại của chương trình.
- Nếu có bất kỳ vấn đề nào về tính toàn vẹn của mẫu, PXN vui lòng chụp ảnh xác nhận, liên hệ trực tiếp qua điện thoại và gửi email (kèm theo hình ảnh của mẫu ngoại kiểm đã chụp) về chương trình để Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Trường Đại học Y Hà Nội (TTKC) làm căn cứ gửi lại mẫu. Thông tin liên hệ xem tại mục 6 của Hướng dẫn này. Các mẫu được TTKC xác nhận hủy bỏ, PXN cần xử lý như mẫu bệnh phẩm lây nhiễm theo đúng quy định về an toàn sinh học.

2. Bảo quản sau khi nhận mẫu:

PXN nhận bộ mẫu và bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C đến khi thực hiện phân tích mẫu. PXN không mở nắp lọ mẫu ngoại kiểm cho tới khi thực hiện phân tích.

3. Chuẩn bị mẫu và phân tích:

Hướng dẫn chung:

PXN thực hiện xử lý và phân tích mẫu theo đúng quy trình như đối với các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm thường quy.

Thông tin lâm sàng:

Mẫu	Dạng mẫu	Thông tin lâm sàng
MI-MHPV-26-04	Mẫu tế bào cổ tử cung	Không áp dụng
MI-MHPV-26-05	Mẫu tế bào cổ tử cung	Không áp dụng
MI-MHPV-26-06	Mẫu tế bào cổ tử cung	Không áp dụng

Xử lý mẫu:

Các mẫu được chuẩn bị và bảo quản trong dung dịch Preservcyt. Mỗi mẫu có dung tích 2mL. **PXN thực hiện xác định genotype HPV theo quy trình thường quy của PXN.**

Lưu ý: PXN cần lưu hồ sơ quan trắc gốc cho việc thực hiện phân tích mẫu ngoại kiểm

4. Báo cáo kết quả phân tích:

Các PXN gửi kết quả về TTKC trước 17h ngày 27/07/2026

Khoa/PXN truy cập địa chỉ: <https://tally.so/r/7RMLqP>, hoặc quét QR-code sau:



5. An toàn sinh học:

Khi thao tác với mẫu ngoại kiểm, PXN cần tuân thủ các quy tắc, hướng dẫn đảm bảo an toàn sinh học tương tự như mẫu bệnh phẩm lây nhiễm.

6. Thông tin liên hệ:

Chương trình ngoại kiểm genotype HPV

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Trường Đại học Y Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02435.747.248/nhánh 15.

Hotline: **0961.153.709**

Email: ngoaikiemvisinh@qcc.edu.vn,

Website: <https://qcc.edu.vn/>.